

**Conseils d'utilisation** : Ajustez les élastiques à votre taille grâce aux nœuds cachés dans la couture de chaque côté. Ne partagez pas votre masque avec une autre personne.

**Entretien** : Lavez le masque avant la première utilisation et après chaque utilisation (1 fois par jour). Le lavage peut se faire à la main ou en machine à 60° avec une lessive classique. Bien rincer, faire sécher au soleil et repasser. Conservez-le dans un endroit propre et sec et réutilisez au besoin.

**NB** : Ce masque ne convient pas aux soignants et aux malades. Ceux-là doivent utiliser des masques chirurgicaux jetables.



## **MEME AVEC CE MASQUE, LES GESTES BARRIERES RESTENT IMPORTANTS**



**MAINS** : Lavez régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon



**COUDE** : Toussez dans le creux de votre coude ou dans un mouchoir jetable



**VISAGE** : Evitez de toucher votre visage



**RASSEMBLEMENTS** : Evitez les rassemblements



**MAISONS** : Restez à la maison et protégez votre famille